


Reiniging & desinfectie met spray

Gebruiken voor het reinigen/desinfecteren van oppervlakken en medische instrumenten.
Desinfecteren na een (mogelijke) besmetting met lichaamsvocht/bloed.

- ✓ Gebruik Incidin Oxy Spray. **Gebruiksklaar**, het product wordt voor gebruik niet verdund.
- ✓ Trek handschoenen aan vóór het desinfectieproces.
- ✓ Verwijder eerst aanwezig bloed/lichaamsvocht met een tissue.
- ✓ Desinfecteer de handen na het uittrekken van de handschoenen met handalcohol.


Methode 1: spray op doek

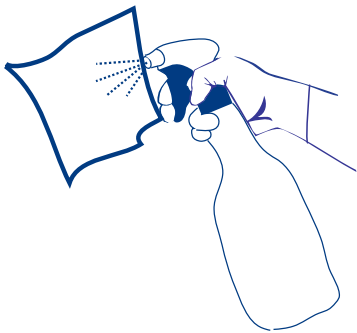

STAP 1:
Bevochtig doek rijkelijk




STAP 2:
Breng aan op oppervlak

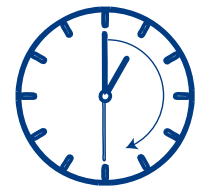


min. 30 sec.

STAP 3:
Laat drogen

Methode 2: spray op grote horizontale oppervlakken

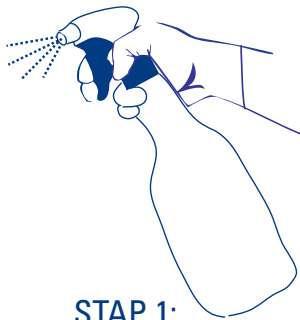

STAP 1:
Bevochtig het oppervlak rijkelijk

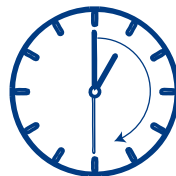

min. 30 sec.

STAP 2:
Laat inwerken



STAP 3:
Wrijf droog met doek



STAP 4:
Werp doekjes na gebruik weg
in de afvallemmer

